

# VENOLINE OFF

## strumpavtagare


Venoline Off kan användas vid alla ben- och fotmått samt för alla typer av strumpor.

**Konstruktion:** Vitlackad metalltråd (5 mm i diameter) med yttermått 54x3 cm samt med krok med måtten 10x3x6 cm. Fog svetsas med en teknik som inte ger ojämnheter där strumpmaterial kan fastna. Handtagets längd gör avtagaren mycket lämplig för brukare med känslig rygg.

**Funktion:** Avtagarens krok sticks ned innanför strumpkanten på benets yttre bakre sida. Strumpkanten trycks ned mot foten. När avtagarens krok når yttre fotknölen placeras kroken bakom fotknölen och förs vidare mot hälen. När yttersta delen av avtagarens krok nått fotsulan förs kroken bakåt mot hälen. Strumpkanten samt den hopsamlade strumpan lyfts över hälen genom att avtagarens skaft förs bakåt ut från benet samtidigt som den trycks nedåt.

**Skötsel m. m.:** Avtagaren rentvättas med tvållösning alternativt med spritlösning. När den är förbrukad avfallssorteras avtagaren som metallföremål.

### Avtagningsinstruktion

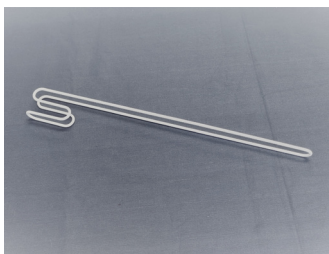

1. Avtagaren har en krok och långt skaft.



2. Kroken sticks ned innanför strumpkanten.



3. Avtagaren trycks nedåt.



4. Avtagaren förs ned bakom yttre fotknölen.



5. När krokens yttersta del nått fotsulan förs kroken bakåt över hälen. Skaftet vinklas ut från benet samtidigt som kroken trycks nedåt så att strumpan kan lyftas nedom hälen.



6. Avtagaren förs framåt och strumpan lyfts av foten.



7. Klart!

**STORLEK: en för alla ben**  
art nr VN7020



7 331004 702007 >



**INVERDIA AB**

Eckbacksvägen 20, SE 168 69 Bromma Sweden  
Tfn +468627 50 44 Fax +46828 58 22  
E-post info@inverdia.com www.inverdia.com