

# VENOLINE ON strumpåtagare

Venoline On kan användas både för strumpor med öppen och sluten tå.


**Konstruktion:** Vitlackerad metalltråd (6 mm i diameter) med yttermått 24x54x16 cm. Fogar svetsas med en teknik som inte ger ojämnheter där strumpmaterial kan fastna. Handtagen är höga vilket gör påtagaren mycket lämplig för brukare med känslig rygg.

**Storleksinformation:** S/M ankelomkrets  $\leq 26$  cm eller skostorlek  $< 43$ ; L/XL ankelomkrets  $> 26$  cm eller skostorlek  $\geq 43$ . Utgå från ankelomkrets (cB enligt vedertagen terminologi) för att välja storlek enligt ovan. Då kan strumpan dras ned över halvcirkelformade hållaren med rimlig kraft. Skostorlek för val av storlek är ett alternativ men inte lika exakt som ankelomkrets. Både S/M och L/XL kan användas även för stora vadmått.

**Funktion:** Strumpan träs över den halvcirkelformade hållaren till dess att strumpans häldel ligger överst. Påtagaren fattas sedan i handtagen och foten sticks ned i strumpan. Strumpåtagaren dras sedan uppåt eller foten sticks ned så att strumpan täcker foten. Därefter förs påtagaren nedåt så att strumpmaterialet förs högre upp på hållaren innan påtagaren igen dras upp över benet. Denna rörelse upprepas till dess att strumpan täcker nästan hela underbenet. Den sista delen av knästrumpa respektive lårdelen av lårstrumpa läggs på plats med händerna.

**Skötsel m.m.:** Påtagaren rentvättas med tvållösning alternativt spritlösning. När den är förbrukad avfallssorteras påtagaren som metallföremål.

## Påtagningsinstruktion

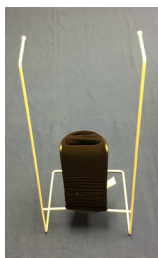

1. Strumpan träs uppifrån och ned över den halvcirkelformade hållaren.



2. Strumpans häldel ligger högst upp.



3. Foten sticks ned i strumpan.




4. Foten förs ned så att hälen ligger i strumpans häldel.



5. Påtagaren dras uppåt så att strumpan placeras över ankeln.



6. Påtagaren förs nedåt så att strumpan matas upp på hållaren.

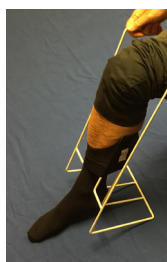

7. Påtagaren dras ånyo uppåt och strumpan placeras högre upp på underbenet.



8. I regel räcker det med 2-3 rörelser uppåt för att strumpan ska täcka nästan hela underbenet.



9. Övre kanten på strumpan justeras avslutningsvis så att den ligger rätt.



10. Klart!

**STORLEK small / medium**  
ankelomkrets (cB)  $\leq 26$  cm  
eller skostorlek  $< 43$   
art nr VN7010



7 331004 701000 >

**STORLEK large / x-large**  
ankelomkrets (cB)  $> 26$  cm  
eller skostorlek  $\geq 43$   
art nr VN7012



7 331004 701208 >

CE

MD

**INVERDIA AB**

Ekbacksvägen 20, SE 168 69 Bromma Sweden  
Tfn +468627 50 44 Fax +46828 58 22  
E-post [info@inverdia.com](mailto:info@inverdia.com) [www.inverdia.com](http://www.inverdia.com)